

INFORMATIONS PRATIQUES

**Cette notice a été conçue pour vous aider à bien utiliser ce produit.
Veuillez la lire attentivement.**

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Pour plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien.
- En cas d'une utilisation non adaptée au produit, veuillez contacter la société Marvel.

Que contient cette notice :

1. Qu'est-ce qu'un COUVRE-ŒIL et dans quel cas est-il utilisé?
2. Comment utiliser le COUVRE-ŒIL?
3. Comment entretenir et conserver le COUVRE-ŒIL?
4. Mises en garde.
5. Durée de vie.
6. Informations supplémentaires.

1. QU'EST-CE QU'UN COUVRE-OEIL ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISÉ?

Le COUVRE-ŒIL est spécialement conçu pour le maintien des pansements oculaires ou la protection de l'œil suite à une intervention chirurgicale.

Il est doté d'une coque en plastique perforée souple. Son attache et son élastique réglable en longueur permettent un maintien contre le visage.

Le COUVRE-ŒIL est réutilisable.

2. COMMENT UTILISER LE COUVRE-OEIL?

- A. Positionner le COUVRE-OEIL, la partie bombée (convexe) vers l'extérieur, afin qu'il recouvre la totalité de l'œil.
- B. Régler la longueur de l'élastique afin que ce soit le plus confortable possible et vérifier que le COUVRE-ŒIL est bien fixé.
- C. Il convient pour l'œil gauche comme le droit et à toutes les formes de visages, dont celles des enfants.

3. COMMENT ENTRETENIR ET CONSERVER LE COUVRE-ŒIL?

Avant chaque emploi, le produit doit être nettoyé.

- A. Laver les éléments à l'eau tiède et savonneuse « entre 20° et 25° ».
- B. Laisser les éléments sécher totalement à l'air libre.

LE COUVRE-OEIL

Protège et sécurise
Perforé léger et ergonomique



Le produit doit être stocké après chaque nettoyage et séchage.

- A. Remettre le produit dans un sachet.
- B. Le ranger dans un endroit propre et sec, à température ambiante.

4. MISES EN GARDE

- Tenir ce produit hors de la vue et de la portée des enfants sans supervision.
- Ne pas utiliser dans un autre emploi que celui pour lequel il est généralement destiné.
- Ne pas exposer ce produit au soleil, ni au froid, ni aux intempéries.
- La conduite d'un véhicule peut ne pas être appropriée avec l'utilisation de ce produit.
- Ne pas jeter ce produit avec les ordures ménagères, ni sur la voie publique. Ce produit est recyclable.

5. DUREE DE VIE

Ce produit n'a pas une durée de vie illimitée. Il faut le remplacer en cas de détérioration ou d'usure naturelle dans le temps.

6. INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

La référence de ce produit est indiquée sur l'étiquette.

Nos produits sont fabriqués en Europe et conditionnés en France.

Nous travaillons avec des fournisseurs fiables, qui utilisent des matières premières de qualité.

Si vous désirez cette notice, merci de vous rapprocher de votre pharmacien ou de notre service clientèle.

La dernière date à laquelle cette notice a été modifiée est: Mars 2018.

**POUR DES RAISONS D'HYGIENE, LES PRODUITS DÉJÀ UTILISÉS
(EMBALLAGE D'ORIGINE OUVERT OU DÉCHIRÉ)
NE SONT NI REPRIS, NI ECHANGÉS**

Pour toute question sur ce produit, contactez:

Marvel - 100 Rue de la Halte -45770 Saran – France

Service.conso@marvel.fr

02 38 86 04 64

MARVEL

Distributeur d'articles et d'accessoires du quotidien, d'hygiène et de bien-être

