



# MONTAGE DE L'APPUI-TÊTE MULTIPOSITIONS SUR LES FAUTEUILS MANUELS LÉGERS

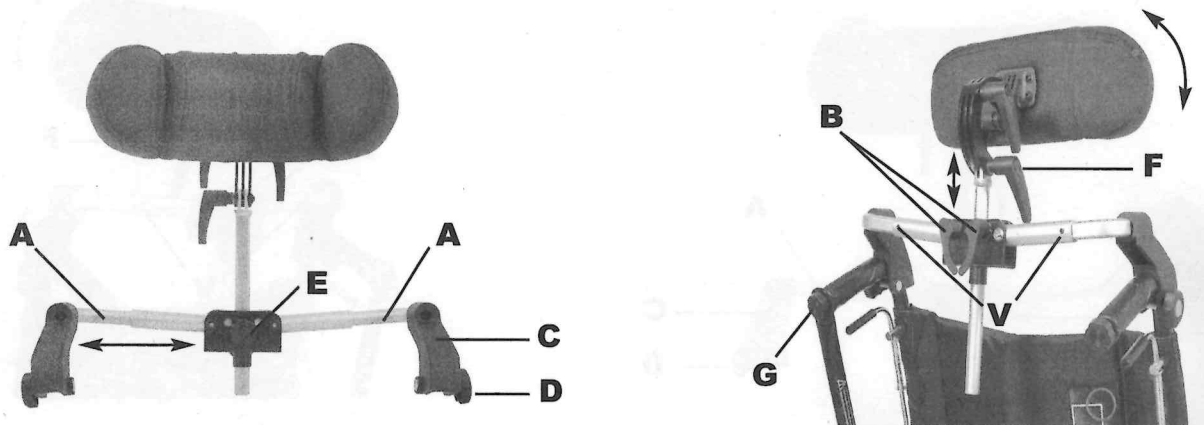


- 1/ A l'aide d'une clef 6 pans de 3mm , dévisser les 2 vis (V), coulisser les 2 demi-traverses (A) en largeur de façon à adapter l'ensemble à la largeur du fauteuil.
- 2/ De chaque côté, dévisser entièrement et retirer les ensembles vis/molette (D). Présenter les embouts plastiques (C) sur les crosses (G) de votre fauteuil. Repositionner et visser les ensembles vis/molette (D) de façon à fixer l'appui-tête sur le fauteuil. Resserrer les vis (V) à l'aide la clef 6 pans de 3mm. Utiliser les 2 leviers (B) pour bloquer ou débloquer horizontalement les traverses (A).
- 3/ Effectuer les différents réglages du coussin suivant la morphologie du patient :
  - Dévisser la molette (E) et faite coulisser le montant pour un réglage en hauteur. Revisser (E) dès que la position souhaitée est obtenue.
  - Dévisser les 3 molettes (F) , articuler les biellettes pour positionner le coussin. Revisser (F) dès que la position souhaitée est obtenue.

- Si besoin, intervenir sur le réglage des 2 maintiens latéraux (oreillettes) à l'aide d'une clef 6 pans de 5mm.

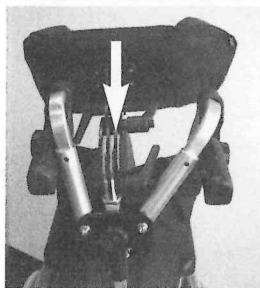

Ouvrir la fermeture à glissière de la housse

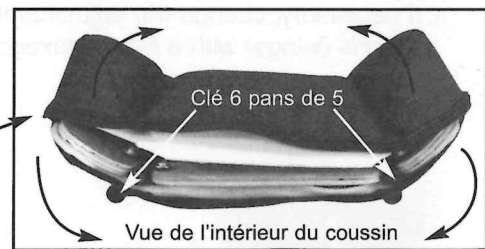

- 4/ Le pliage du fauteuil reste possible après assemblage de l'appui-tête pour cela appuyer sur les 2 leviers (B) et abaisser les traverses (A).



L'assemblage doit être effectué par un technicien habilité et expérimenté. Attention aux risques de pincement lors du montage.

Le montage de l'appui-tête est sous l'entière responsabilité du client.

DUPONT MEDICAL ne pourra être tenu pour responsable en cas de mauvais fonctionnement dû au montage.