

Osmo Soft

Brûlures & Coups de soleil

Tube de 50 g ou de 150 g

Composition :

CARBOMÈRES, OCTANEDIOL, GLYCEROL, POLYETHYLENEGLYCOL, SODIUM HYDROXYDE, EAU PURIFIÉE.

Indications :

OSMO SOFT est un hydrogel destiné au traitement des brûlures superficielles (douleurs, rougeurs et apparition de cloques sur une surface peu étendue) : brûlures domestiques, coups de soleil...

Propriétés :

- Apaise.
- Réduit la rougeur cutanée (diminution de l'érythème induit par des brûlures du 1^{er} degré).
- Réhydrate les couches superficielles de la peau.
- Favorise la cicatrisation des brûlures (lésions provoquées par des brûlures du 1^{er} degré et 2^{ème} degré superficiel).

OSMO SOFT ne contient pas de conservateur.

Mode d'emploi :

Voie cutanée. Appliquer OSMO SOFT sur toute la surface de la brûlure en procédant à de légers massages. Laisser pénétrer. Répéter l'application 2 à 3 fois par jour.

Contre-indications :

- Ne pas utiliser en cas d'allergie connue à l'un des composants d'OSMO SOFT.
- Ne pas appliquer sur des brûlures profondes (2^{ème} degré profond et 3^{ème} degré) ni sur des brûlures infectées.
- Ne pas appliquer sur une peau écorchée, présentant une destruction du derme.
- Ne pas utiliser chez le nouveau-né prématuré.
- Ne pas appliquer sur les muqueuses, ni sur les yeux.

Précautions d'emploi :

- Il est déconseillé d'utiliser ce produit chez l'enfant de moins d'un an.

Effets non souhaités et gênants :

L'application d'OSMO SOFT peut s'accompagner de sensation de picotement. Dans certains cas rares, OSMO SOFT peut entraîner des douleurs locales, transitoires, parfois intenses et sans gravité. En cas de douleur, rincer abondamment la peau à l'eau et interrompre immédiatement le traitement.

Ne pas hésiter à demander l'avis de votre pharmacien ou de votre médecin et à signaler tout effet non souhaité et gênant qui ne serait pas mentionné dans cette notice.

Conservation :

Ne pas exposer à une source de chaleur directe. Ne pas dépasser la date limite d'utilisation figurant sur le conditionnement extérieur.

NE PAS LAISSER À LA PORTÉE DES ENFANTS

Dispositif Médical



COOPÉRATION PHARMACEUTIQUE FRANÇAISE
Place Lucien Auvert – 77020 Melun Cedex – France

Sous licence



CE 0459

Année de marquage CE : 2005