



THUASNE

le gilet

Gilet d'immobilisation
d'épaule



Gilet d'immobilisation d'épaule

Description

Le gilet est un gilet d'immobilisation d'épaule. Cette orthèse est composée de deux parties en textile : un manchon doté de deux sangles pour le maintien du bras et d'une bande plus large, auto-agrippante, qui permet de plaquer le bras contre le corps, permettant ainsi l'immobilisation totale du bras. Ce gilet permet une immobilisation dite «coude-au-corps» après un traumatisme de l'épaule et/ou du coude. Il s'agit d'un produit bilatéral.

Composition

Face intérieure : Polyester
Face extérieure : Polyester
Mousse : Polyuréthane

Propriétés / Mécanisme d'action

Propriétés :

- Gilet d'immobilisation d'épaule permettant une immobilisation du bras coude-au-corps.
- Large bande additionnelle auto-agrippante pour accroître le maintien, contrôler les contraintes soumises à l'articulation et assurer l'immobilisation.

Mécanisme d'action / Destination :

Le gilet d'immobilisation est destiné à être utilisé sur le membre supérieur, par des adultes répondant aux indications présentées ci-après. Elle permet une immobilisation du bras coude-au-corps, de l'épaule et/ou du coude.

Indications

- Traumatismes ou états inflammatoires de l'épaule et/ou du coude.
- Fracture proximale non chirurgicale de l'humérus.
- Luxation de l'épaule.
- Immobilisation post-opératoire (suite de chirurgie de la coiffe des rotateurs ou réduction de luxation).
- Prévention de la luxation de l'épaule en cas d'instabilité articulaire ou laxité.
- Soutien du bras paralytique.

Mode d'emploi / Mise en place

Mise en place :

- Vérifier l'intégrité du produit avant toute utilisation.
- S'assurer que la taille du produit est appropriée au besoin d'appareillage du patient.
- Le professionnel de santé doit superviser la mise en place du produit sur le patient lors de la première utilisation du dispositif. La mise en place de ce produit nécessite l'aide d'une tierce personne.
- Le port du gilet d'immobilisation est recommandé la journée et la nuit en protection afin de limiter et d'éviter les mouvements brusques.

Mise en place du manchon et des sangles :

1. Placer délicatement l'avant-bras dans le manchon prévu à cet effet et faire passer les deux sangles au-dessus des épaules (A).
2. Croiser les deux sangles dans le dos (B) et les passer sous le manchon afin de les fixer dessus (C).

Mise en place de la bande additionnelle :

3. Attacher la bande large additionnelle avec l'auto-agrippant sur le manchon et faire le tour de la taille et du bras puis revenir fixer cette même bande sur le manchon (D).

Contre-indications

- Ne pas utiliser le produit en cas de diagnostic incertain.
- Ne pas placer le produit directement en contact avec une peau lésée.
- Allergie connue aux matériaux.

Précautions




- Suivre les conseils du professionnel de santé qui a prescrit ou délivré le produit.
- Ne pas mettre le dispositif en contact direct avec un corps gras (pommade, crème...)
- Le serrage du dispositif doit être suffisant pour maintenir l'articulation mais pas trop excessif pour ne pas limiter la circulation sanguine.
- Vérifier quotidiennement l'état du bras. En cas d'inconfort, d'engourdissement du membre supérieur, de gêne, de douleurs, de gonflements, de modification de sensation, de réactions inhabituelles (allergies...) ou de changement de coloration de la peau, arrêter l'utilisation du dispositif et consulter un professionnel de santé.
- Il n'est pas recommandé de conduire un véhicule en étant équipé de Le Gilet. La capacité de conduite d'un véhicule avec le dispositif doit être évaluée par le professionnel de santé.
- Si le dispositif entre en contact avec de l'eau, faire sécher la partie textile.
- Pour des raisons d'hygiène et de performance, ne pas réutiliser le produit pour un autre patient. Les conséquences d'une utilisation chez un autre patient n'ont pas été testées.
- Tout incident grave survenu en lien avec le dispositif devrait faire l'objet d'une notification au fabricant et à l'autorité compétente de l'État Membre dans lequel l'utilisateur et/ou le patient est établi.
- Éliminer le produit avec les déchets ménagers (pas de conditions particulières d'élimination).
- Ne pas utiliser le dispositif s'il est endommagé.

Effets secondaires indésirables

Possibilité d'un risque de démangeaison/réaction cutanée à la suite du contact de la peau avec le dispositif.


Maintenance / Entretien

- Produit lavable selon les conditions présentes sur cette notice et l'étiquetage.
- Stocker à température ambiante, de préférence dans l'emballage d'origine.
- Fermer les auto-agrippants avant lavage.
- Ne pas utiliser de détergents, adoucissants ou de produits agressifs (produits chlorés).
- Essorer par pression. Sécher à l'air libre, loin d'une source de chaleur.

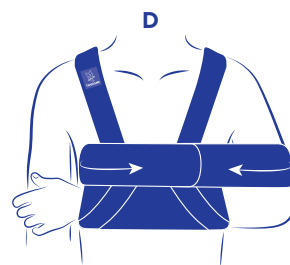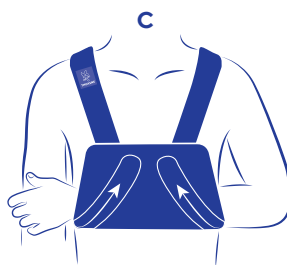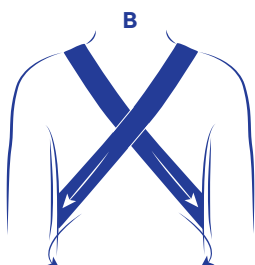

TAILLES

1	50 - 90 cm
2	91 - 120 cm
3	121 - 150 cm

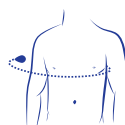

Indice de mesure :
tour de "poitrine
+ humérus"



2020-01 / 6150402

